

Vägledning för kapillär blodprovstagning och applicering

För optimal användning av LumiraDx Platform är det viktigt att kapillärblodprov är korrekt insamlade och applicerade på LumiraDx Testkort. Detta dokument innehåller ytterligare vägledning för provtagning och applicering. Läs bruksanvisningen för Platform och bipacksedeln för Testkort innan du utför analys för första gången.

Prover kan appliceras direkt från ett fingerstick eller använda en transferpipett.

Ta ett kapillärblodprov med ett stick i fingret

Använd en lansett nära fingertoppen på den sida som är vänd nedåt.

Vid behov krama fingret varsamt från dess bas för att skapa en tillräckligt stor hängande bloddroppe.



Punktionsställe på fingret och minsta storlek på hängande bloddroppe.




Provappliceringsområde.

Applicera ett fingersticksprov på Testkortet

Låt den hängande bloddroppen från fingersticket precis vidröra Testkortets provappliceringsområde.

Säkerställ att provet appliceras i mitten och fullständigt fyller provappliceringsområdet med en jämn droppe.

Låt inte fingret vidröra Testkortet för att undvika att provet smetas ut.

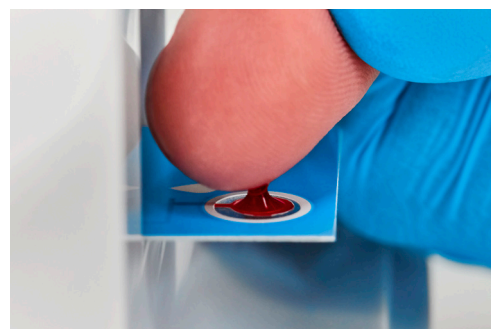

Applicera ett blodprov på Testkortet.


Ta ett kapillärblodprov och använd en transferpipett

Använd en lansett för att få fram en bloddroppe på fingertoppen.

Håll transferpipetten rakt och vidrör toppen på bloddroppen.

Kapillärkraften kommer automatiskt att dra upp provet in i pipetten.


- Kläm inte på transferpipettens bulb före eller under provtagningen.
- Låt inte transferpipetten vidröra fingret.
- Säkerställ att transferpipetten fylls till den svarta fyllningslinjen.
- Säkerställ att det inte finns några luftbubblor i provet som finns i transferpipetten. Om det finns luftbubblor, kassera transferpipetten och provet och börja om på nytt.

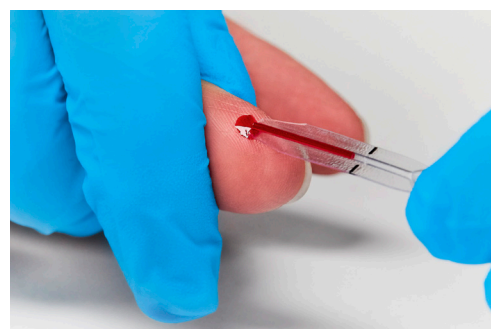

Transferpipetten fylls rakt med en stor bloddroppe. Pipetten ska fyllas till den svarta linjen för tillräcklig provvolym.

Applicera provet från transferpipetten på Testkortet

Håll den fyllda transferpipetten vertikalt över provappliceringsområdet på Testkortet och kläm försiktigt på bulben för att dispensera provet.

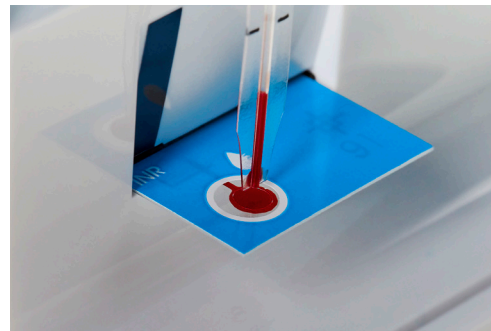


Håll transferpipetten vertikalt för att försiktigt applicera provet.

Exempel på korrekt applicerade prov



Korrekt applicerat prov.

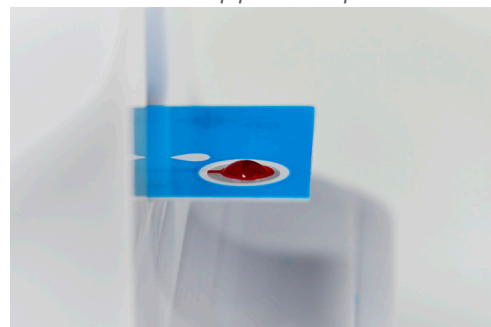

Korrekt applicerat prov.

Exempel på inkorrekt applicerade prov



Applicerad provvolym är inte tillräcklig.



Luftbubblor i provappliceringsområdet.